

Instrukcja użycia

Fasenra 30 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

benralizumab

Do wstrzyknięcia podskórnego

Wstrzykiwacz półautomatyczny napelniony do jednorazowego użycia

Przed użyciem Fasenra Pen lekarz powinien pokazać pacjentowi lub opiekunowi pacjenta, jak poprawnie używać wstrzykiwacza.

Należy przeczytać tę „Instrukcję użycia” przed rozpoczęciem stosowania wstrzykiwacza Fasenra Pen i za każdym razem, gdy pacjent otrzymuje ten lek. Mogą pojawić się nowe informacje. Podane tu informacje nie zastępują rozmowy z lekarzem na temat choroby występującej u pacjenta lub jej leczenia.

Jeśli pacjent lub opiekun pacjenta mają jakiegokolwiek pytania, należy zwrócić się z nimi do lekarza.

Ważne informacje

Lek Fasenra należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C w tekturowym pudełku aż do czasu podania leku. Lek Fasenra można przechowywać w temperaturze pokojowej nieprzekraczającej 25°C przez maksymalnie 14 dni. Po wyjęciu z lodówki lek Fasenra należy zużyć w ciągu 14 dni lub wyrzucić.

Nie używać wstrzykiwacza Fasenra Pen, jeśli:

- lek został zamrożony
- lek został upuszczony lub uszkodzony
- zabezpieczenie na tekturowym pudełku zostało przerwane
- termin ważności leku (EXP) minął


Nie:

- wstrząsać wstrzykiwaczem Fasenra Pen
- udostępniać innym osobom i nie używać ponownie wstrzykiwacza Fasenra Pen

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, należy wyrzucić Fasenra Pen do odpornego na przebicie pojemnika na ostre odpady i użyć nowego wstrzykiwacza Fasenra Pen. Każdy Fasenra Pen zawiera 1 dawkę leku Fasenra przeznaczoną wyłącznie do jednorazowego użycia. Lek Fasenra i wszystkie leki należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Wstrzykiwacz Fasenra Pen

Nie zdejmować nakrywki na wstrzykiwacz przed Krokiem 6 tej instrukcji i gotowością do wstrzyknięcia leku Fasenra.

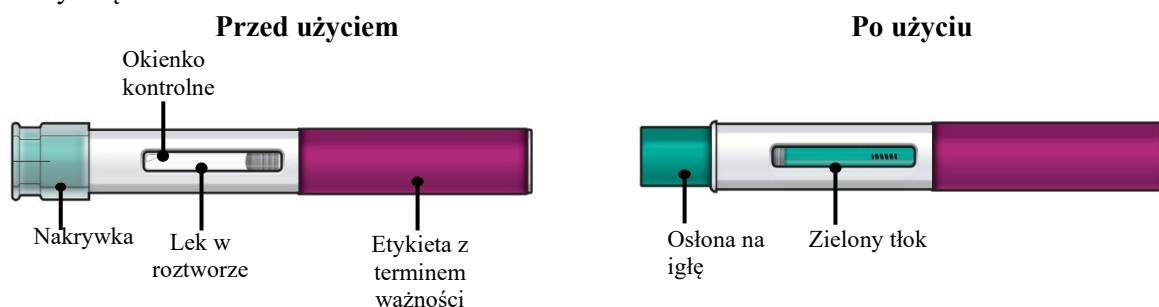

Krok 1 – Zgromadzić materiały

- 1 Fasenra Pen wyjęty z lodówki
- 1 gazik nasączony alkoholem

- 1 wacik lub gazik
- 1 odporny na przebicie pojemnik na ostre odpady.
(Patrz Krok 10 – Bezpiecznie usunąć zużyty wstrzykiwacz Fasenra Pen)



Fasenra Pen



Gazik nasączony
alkoholem



Wacik lub gazik



Pojemnik na ostre
odpady

Krok 2 – Przygotować Fasenra Pen do użycia

Sprawdzić termin ważności (EXP). Nie używać, jeśli termin ważności minął.
Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy wyjąć pudełko z lekiem z lodówki i pozostawić na około 30 minut do osiągnięcia temperatury pokojowej wynoszącej od 20°C do 25°C.


Nie ogrzewać wstrzykiwacza Fasenra Pen w żaden inny sposób. Na przykład nie ogrzewać go w mikrofalówce ani w gorącej wodzie i nie umieszczać go w pobliżu innych źródeł ciepła.

Lek Fasenra należy użyć w ciągu 14 dni od wyjęcia z lodówki.

Nie zdejmować nakrywki do chwili wykonywania Kroku 6.



Krok 3 – Obejrzeć płyn

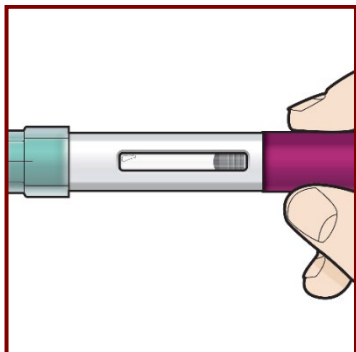


Obejrzeć płyn we wstrzykiwaczu Fasenra Pen patrząc przez okienko kontrolne. Płyn powinien być przezroczysty i bezbarwny do żółtego. Płyn może zawierać małe, białe cząstki.

Nie wstrzykiwać leku Fasenra, jeśli płyn jest mętny, przebarwiony lub zawiera duże cząstki.

Płyn może zawierać mały pęcherzyk powietrza; jest to sytuacja normalna. Nie ma konieczności podejmowania żadnego działania w związku z obecnością pęcherzyka powietrza.

Krok 4 – Wybrać miejsce wstrzyknięcia

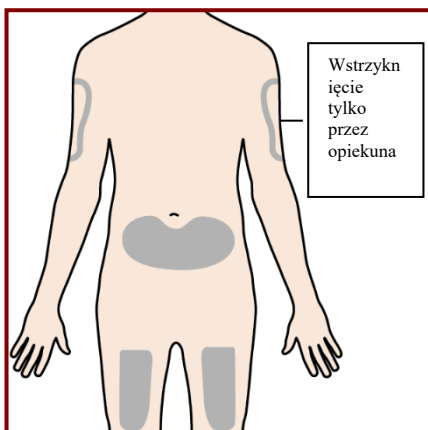

Zalecany miejscem wstrzyknięcia jest przednia powierzchnia uda. Lek można także wstrzyknąć w dolną część brzucha.


Nie wstrzykiwać leku:

- w promieniu 5 cm od pępka
- w miejsca, gdzie skóra jest bolesna, posiniaczona, łuszcząca lub stwardniała
- w blizny lub uszkodzoną skórę
- przez ubranie

Opiekun pacjenta może wstrzyknąć lek w górną część ramienia, udo lub brzuch. **Nie** należy próbować wstrzykiwać sobie leku w ramię.

Przy każdym wstrzyknięciu należy wybierać inne miejsca na skórze, znajdujące się w odległości co najmniej 3 cm od miejsca ostatniego wstrzyknięcia.

Krok 5 – Oczyszczyć miejsce wstrzyknięcia

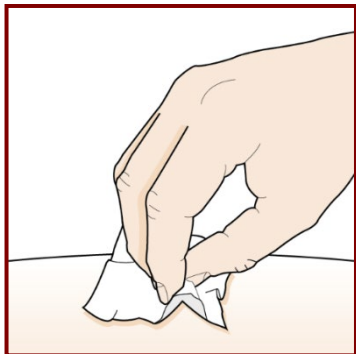


Umyć dokładnie ręce wodą z mydłem.

Oczyszczyć miejsce wstrzyknięcia przecierając je gazikiem nasączonym alkoholem, wykonując koliste ruchy. Pozostawić do wyschnięcia.

Nie dotykać oczyszczonego miejsca przed wykonaniem wstrzyknięcia.

Nie osuszać oczyszczonego miejsca za pomocą urządzeń mechanicznych ani nie dmuchać na nie.

Krok 6 – Zdjąć nakrywkę wstrzykiwacza

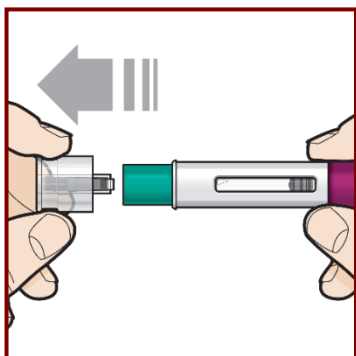

Trzymając wstrzykiwacz Fasenra Pen jedną ręką, drugą ręką ostrożnie zdjąć nakrywkę ruchem po linii prostej.

Odłożyć nakrywkę na bok, aby ją później wyrzucić.

Zielona osłona igły jest teraz odsłonięta – uniemożliwia ona dotknięcie igły.

Nie próbować dotykać igły ani nie naciskać osłony igły palcem.

Nie próbować nakładać nakrywki z powrotem na wstrzykiwacz Fasenra Pen. Może to spowodować zbyt wczesne wstrzyknięcie leku lub uszkodzenie igły.

Po zdjęciu nakrywki należy natychmiast wykonać opisane niżej czynności.


Krok 7 – Wstrzyknąć lek Fasenra

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi przez lekarza dotyczącymi wstrzykiwania leku. Można delikatnie chwycić fałd skóry między palce lub wykonać wstrzyknięcie bez chwytania za skórę.

Wstrzyknąć lek Fasenra wykonując czynności pokazane na rysunkach **a**, **b**, **c** i **d**.


Przez cały czas wykonywania wstrzyknięcia trzymać Fasenra Pen nieruchomo w miejscu.

Nie zmieniać położenia wstrzykiwacza Fasenra Pen po rozpoczęciu wstrzyknięcia.

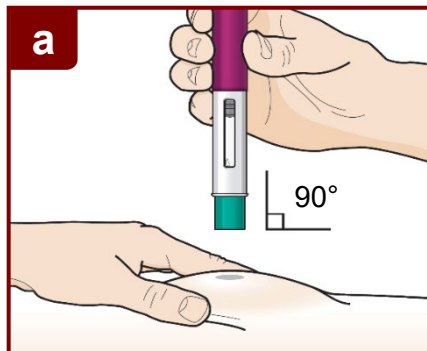


Umieścić wstrzykiwacz Fasenra Pen w miejscu wstrzyknięcia.


Przyłożyć osłonę igły wstrzykiwacza Fasenra Pen tak, by przylegała płasko do skóry (pod kątem 90 stopni). Należy upewnić się, że okienko kontrolne jest widoczne.

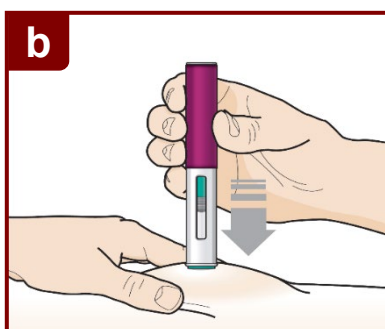

Mocno przycisnąć wstrzykiwacz do skóry.
Pacjent usłyszy kliknięcie.
“**Kliknięcie**” oznacza rozpoczęcie wstrzyknięcia leku. Podczas wstrzyknięcia zielony tłok będzie przesuwał się w dół okienka kontrolnego.

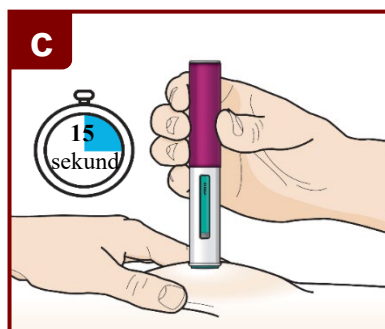

Przytrzymać wstrzykiwacz mocno przez 15 sekund.
Pacjent usłyszy drugie “kliknięcie”. Drugie kliknięcie oznacza zakończenie wstrzyknięcia. Zielony tłok wypełni okienko kontrolne.

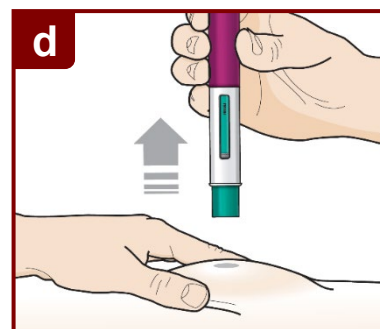


Unieść Fasenra Pen do góry.
Osłona igły opuści się zamykając igłę w środku.



Krok 8 – Sprawdzić okienko kontrolne

Sprawdzić okienko kontrolne upewniając się, że cały roztwór został wstrzyknięty.

Jeśli zielony tłok nie wypełnia okienka kontrolnego, możliwe jest, że pacjent nie otrzymał pełnej dawki leku. W takiej sytuacji lub w przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

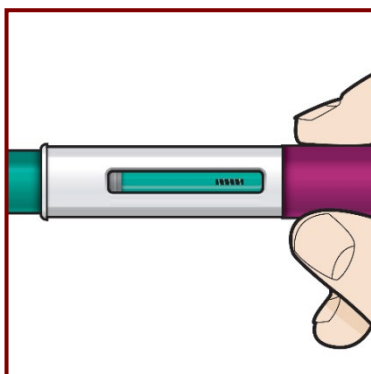


Przed
wstrzyknięciem

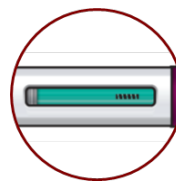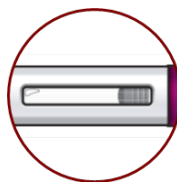

Po
wstrzyknięciu

Krok 9 – Obejrzeć miejsce wstrzyknięcia

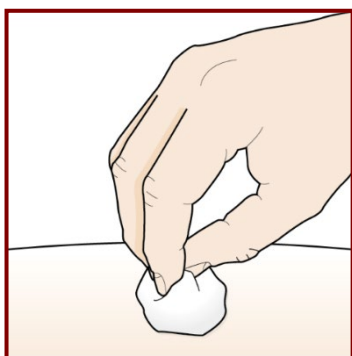


W miejscu wstrzyknięcia może pojawić się niewielka ilość krwi lub płynu. Jest to zjawisko normalne.

Delikatnie ucisnąć miejsce na skórze wacikiem lub gazikiem do czasu, gdy krwawienie ustanie.

Nie pocierać miejsca wstrzyknięcia.

W razie potrzeby osłonić miejsce wstrzyknięcia niewielkim bandażem.

Krok 10 – Bezpiecznie wyrzucić użyty wstrzykiwacz Fasenra Pen

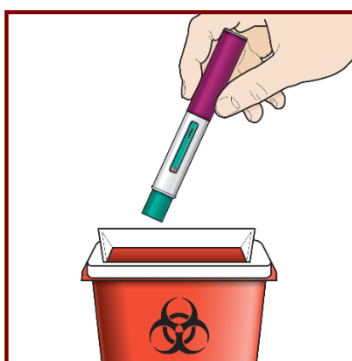

- Każdy wstrzykiwacz Fasenra Pen zawiera pojedynczą dawkę leku Fasenra i **nie wolno używać go ponownie**.
- Bezpośrednio po użyciu należy umieścić zużyty wstrzykiwacz Fasenra Pen w odpornym na przebicie **pojemniku na ostre odpady**.

Nie wyrzucać wstrzykiwacza Fasenra Pen do domowych pojemników na odpady.

Nakrywkę i pozostałe zużyte materiały należy wyrzucić do domowego pojemnika na odpady.

Wskazówki dotyczące usuwania

Pełny pojemnik należy usunąć zgodnie ze wskazówkami podanymi przez lekarza lub farmaceutę.

Nie poddawać recyklingowi zużytego pojemnika na ostre odpady.